


WICHTIG: Kodierung der Proben (klinisches Material)

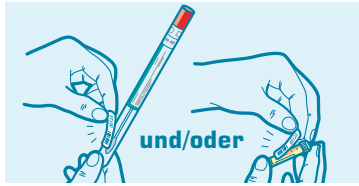

Auf der beiliegenden Codekarte D befinden sich 2 Kodierungsaufkleber die Sie auf das Urin Sammelrohr B und/oder auf das Wattestäbchen und Sammelrohr C kleben sollen. Damit wird das Testergebnis an Ihre Login-Code zugeordnet. **Vergessen Sie dies nicht und verwahren Sie Ihren Codekarte mit dem Login-Code gut** damit Sie die Ergebnisse über die Webseite abrufen können.

Einreichen der Proben

Platzieren Sie das Urin Sammelrohr B und/oder das Wattestäbchen und Sammelrohr C plus das Absorptionsmaterial im Vakuumdichtungs-Speicher-Beutel F. Entfernen Sie die silberne Folienstreife vom Kleberand und kleben Sie die Plastiktüte fest zu. Legen Sie den gefüllten Beutel zurück in die portofreie Versandverpackung G. Kleben sie den Beutel mit dem runden Siegel zu die sich auf der Codekarte D befindet. Die Retour Box hat bereits eine Retouradresse mit Freiumschlag. Sie brauchen also KEINE Briefmarken auf der Retour Box draufkleben.

Abrufen Ihrer Ergebnisse

Der Versand dauert in der Regel 2 Tage und die Test-Analyse dauert 5 Arbeitstage, einschließlich der administrativen Verarbeitung. Nach 7 Tagen können Sie Ihre Ergebnisse über die Website anfordern:

- Besuchen Sie www.microbiome.eu
- Klicken Sie auf 'Microbiome Hause testing' und dann 'Testergebnisse zu Hause'
- Sie können dann Ihren Login-Code im Text-feld eingeben und das Testergebnis wird angezeigt
- Bitte beim Testergebnis auf **OK klicken** damit wir wissen dass Sie das Ergebnis gesehen haben!



STD- Heimtest



- Halten Sie den Test außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Benutzen Sie den Test nicht nach dem das Haltbarkeitsdatum überschritten ist.
- Lagern bei einer Temperatur von 4-28 °C.
- Alle Komponenten sind zum einmaligen Gebrauch.


Test zu Hause ist Ihr Spezialist auf dem Gebiet von Tests für den Heimgebrauch und ermöglicht eine kontinuierliche Entwicklung neuer Tests.

Schauen Sie sich die neuesten Entwicklungen auf www.microbiome.eu an



Microbiome Ltd.
www.microbiome.eu

Wattestäbchen  
COPAN, Via F. Perotti 10,
25125 Brescia, Italy

Vakuumdichtungs-Speicher-Beutel 
Transposafe Systems Holland BV,
Wattstraat 7a, 2171 TP Sassenheim, NL

Transferpipette
SARSTEDT AG & Co, Sarstedtdraße,
51582 Nümbrecht, Germany

CT-NG-TV patentierter Test



In-vitro-Diagnostika für den Heimgebrauch.



STD- Heimtest

Beipackzettel

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig durch, vor dem Start des Tests.




Gebrauchsanleitung STD Heimtest

Dieser Test erkennt die häufigsten sexuell übertragbaren Krankheiten *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* und *Trichomonas vaginalis*.

Unbehandelte Geschlechtskrankheiten können zu Unfruchtbarkeit, ektopischen Schwangerschaften und/oder Gebärmutterentzündungen führen. Der Heimtest weist nach ob eins dieser STDs in dem klinischen Material das Sie einreichen existiert.

Im Falle eines positiven Testresultats ist es wichtig, dass Sie und Ihr(e) (Ex-) Partner behandelt werden.

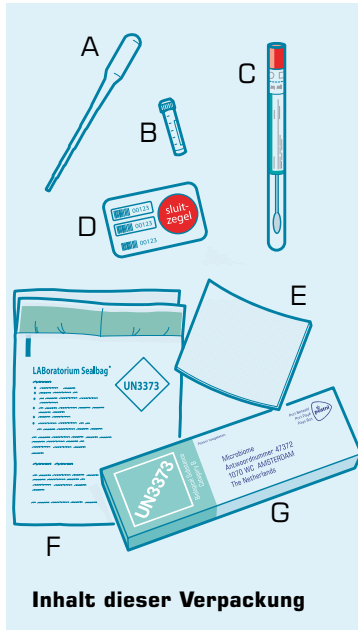


Inhalt dieser Verpackung


- A. Urinpipette
- B. Urin Sammelrohr
- C. Wattestäbchen und Sammelrohr
- D. Code-Karte mit Aufklebern und Login-Code für das Testergebnis
- E. Absorptionsmaterial (kann im Vakuumdichtungs-Speicher-Beutel F bleiben)
- F. Vakuumdichtungs-Speicher-Beutel
- G. Versandverpackung

Für Frauen und Männer: Urinabnahme

Urinieren Sie vorzugsweise morgens nach dem Aufstehen (Sie sollen mindestens 2 Stunden vorher nicht uriniert haben) in einem Glasbehälter. Es ist von großer Bedeutung dass eine geringe Menge des ersten Urinstroms (15-20ml) im Glasbehälter aufgefangen wird. Fügen Sie mit der beiliegenden Urinpipette A 1,25 ml in dem beiliegenden Urin Sammelrohr B zu.

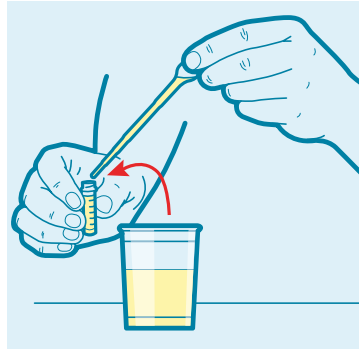

Verschließen Sie das Urin Sammelrohr!

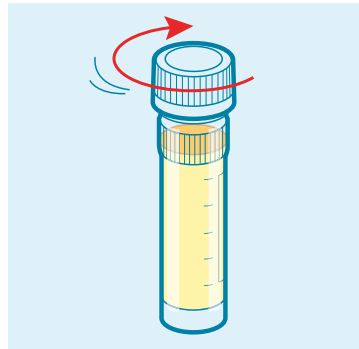


Für Frauen und Männer: Abnahme von Analabstrich

Falls zutreffend zum Testen dieser anatomischen Stelle, verwenden Sie Wattestäbchen und Sammelrohr C. Bringen Sie das Wattestäbchen 2-3 cm im After herein und drehen Sie es 10 Sekunden, platzieren Sie das Sammelrohr genauso wie in dem Bereich Vaginalabstrich beschrieben wird.

Für Frauen: Abnahme von Vaginalabstrich

Frauen sollten nebst einer Urinprobe auch einen Vaginalabstrich einschicken. Verwenden Sie für den Vaginalabstrich das Wattestäbchen und das Sammelrohr C.

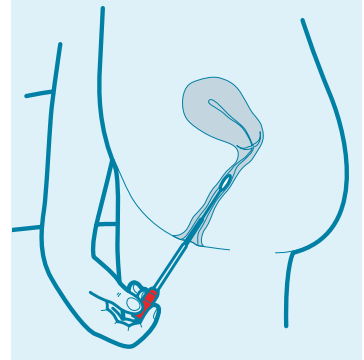

Entfernen Sie das Wattestäbchen aus dem Sammelrohr C wobei das Siegel gebrochen wird. Stellen Sie sicher dass ihr Körper eine bequeme Haltung einnimmt, sitzend oder stehend, ähnlich wie beim einführen eines Tampons. Trennen Sie behutsam Ihre Schamlippen mit einer Hand, so dass die Vagina zugänglich ist. Führen Sie das Wattestäbchen 2-5 cm in die Scheide hinein und drehen Sie es 10-15 Sekunden, wobei Sie entlang die Wände der Vagina streicheln.

Entfernen Sie das Wattestäbchen aus der Scheide und legen Sie es wieder in dem Sammelrohr. Drücken Sie die rote Kappe fest auf dem Sammelrohr.

